


# OBLIČEJOVÝ PLEXI ŠTÍT TITAN 2


Oblíčejoyvý polykarbonátový TITAN 2 štít byl vyvinut v reakci na akutní nedostatek osobních ochranných prostředků v nemocnicích a dalších místech kvůli šíření koronaviru (COVID-19). Hledí štítu je vyrobeno z čirého polykarbonátu, hlavová čelenka ze zdravotně nezávadného polypropylenu (PP-H) a fixační nýty z kvalitního polyamidu PA66. Hlavová čelenka umožňuje flexibilního nastavení velikosti podle rozměru hlavy pomocí elastické gumičky. Transparentní hledí je upevněno na hlavovou 4 plastovými rozpěrnými nýty.

Povrch všech komponent je chráněn před poškrábání a nežádoucí virovou nebo bakteriální kontaminací oboustrannou PE folií. Hrany mají hladké okraje bez nežádoucích otřepů. Výhodou štítu vyrobeného z polykarbonátu je jeho jednoduchá konstrukce a výborná optika hledí bez deformací zorného pole. Montáž štítu je jednoduchá a kompletaci zvládne každý sám za pár minut podle návodu.

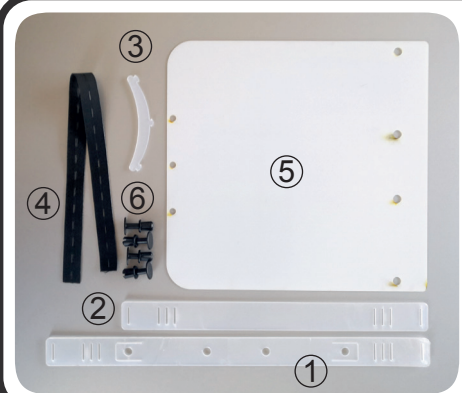

Obsah balení		
①	Vnější díl hlavové čelenky, delší perforovaný pásek, s kruhovými otvory ( PP )	1 ks
②	Vnitřní díl hlavové čelenky, kratší perforovaný pásek ( PP )	1 ks
③	Spodní výztužný díl hledí ( PP )	1 ks
④	Gumička elastická s otvory černá délka 40 cm	2 ks
⑤	Hledí z polykarbonátu průhledný polykarbonát síly 0,8 mm ( PC )	1 ks
⑥	Rozpěrný plastový nýt ( PA66 )	4 ks

## Postup sestavení štítu

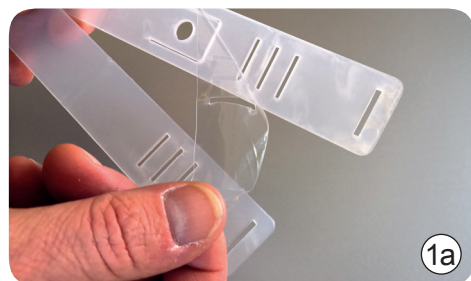

### ① Příprava na sestavení hlavové čelenky




Nosná část hlavové čelenky se skládá ze dvou dílů: vnější díl hlavové čelenky (delší, perforovaný pásek, s kruhovými otvory) a vnitřní díl hlavové čelenky (kratší, perforovaný pásek).


①a Nejprve odstraňte krycí fólii z obou stran obou plastových dílů čelenky. Vnitřní, kratší díl hlavové čelenky je po sestavení štítu v kontaktu s hlavou. Vnější, delší část obsahuje 4 kruhové otvory, které slouží k přichycení transparentního hledí plastovými rozpěrnými nýty.

### ② Sestavení hlavové čelenky, navléknutí elastické gumičky

Vnější a vnitřní díl hlavové čelenky přiložte k sobě tak, aby byly na jedné ze stran podlouhlé otvory obou dílů v zákrytu pro provlečení elastické gumičky. ②a Elastickou gumičku začněte navlékat ve směru skrz vnější díl hlavové čelenky ( delší pásek ). ②b Postupně provlečte střídavě všemi otvory. Elastickou gumičku je možno zakrátit. V případě, že se konec gumičky při navlékání roztřepí, doporučujeme gumičku o kousek zkrátit pomocí nůžek.

Po provlečení gumičky na jedné straně vytvarujte tvar hlavové čelenky ohybem obou částí čelenky do oblouku ve tvaru hlavy. Oba volné konce vnějšího a vnitřního dílu hlavové čelenky přiložte opět k sobě tak, aby byly otvory v zákrytu. ②c Stejným způsobem provlekněte gumičku i na druhé straně. Opět začněte provlékat z vnější strany, tj, nejprve skrz vnější díl hlavové čelenky. ②d Po navléknutí druhé gumičky si upravte velikost hlavové čelenky podle obvodu vaší hlavy. Přesahující konce gumičky na obou stranách můžete zkrátit pomocí nůžek nebo přesahy navléknout do otvorů v přední části hlavové čelenky.

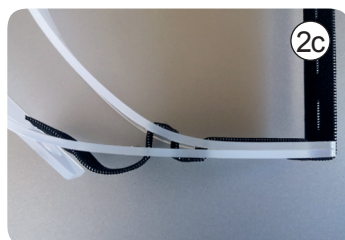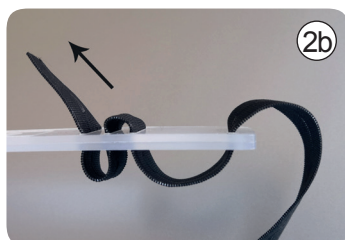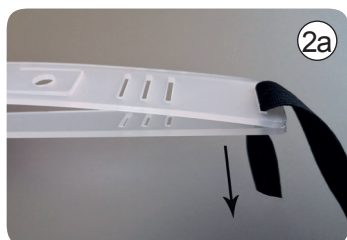


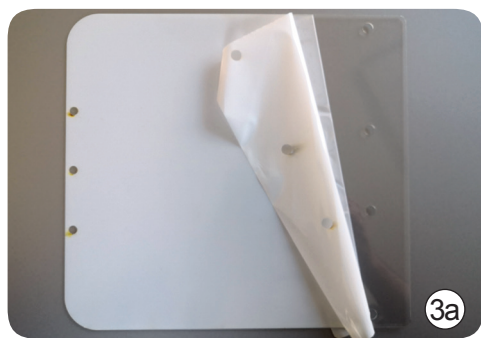

3a



3b

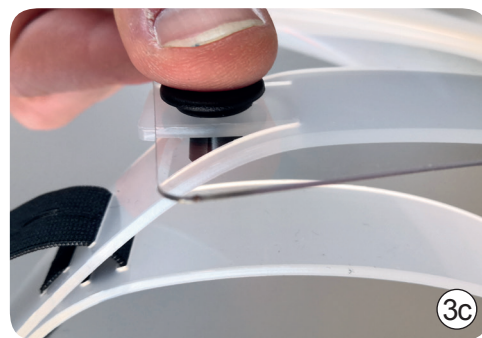

3c

### ③ Nasazení průhledného hledí na hlavovou čelenku

③a Opatrně odstraňte ochrannou folii v horní části hledí, kde se nachází 4 montážní otvory. Přizvednutí fólie provedte lehce nehtem.

③b Hledí s částečně odstraněnou folií v místě montážních otvorů postupně přichyťte rozpěrnými plastovými nýty. Montáž můžete začít z libovolné strany. Po zasunutí spodní části nýtu do montážního otvoru, ③c zasuňte do nýtu rozpěrný kolíček, čímž dojde k pevnému připevnění hledí na hlavovou čelenku. Tím je montáž hledí na hlavovou čelenku dokončena. Při montáži hledí dejte pozor, aby nedošlo k jeho poškrábání.



3a



3b

### ④ Nasazení spodního výztužného dílu na hledí

Opatrně odstraňte ochrannou folii ve spodní části hledí, kde se nachází 3 montážní otvory pro montáž výztuhy. Z obou stran výztuhy odstraňte opět krycí fólii.


③a Klikem nasadte nejdříve prostřední kolíček do otvoru v hledí a ③b poté postupně oba zbývající krajní kolíčky. Případně zacvakněte nejprve oba krajní kolíčky výztuhy do otvorů v hledí a nakonec prostřední kolíček.

### ⑤ Dokončení sestavení štítu

Odstraňte zbylou část krycí folie z hledí. Štít před použitím doporučujeme vydesinfikovat.



POZOR: ŠTÍT NIKDY NEČISTĚTE NASUCHO, VYHNĚTE SE MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HLEDÍ OTĚREM A MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, aby nedošlo ke zhoršení optických vlastností.

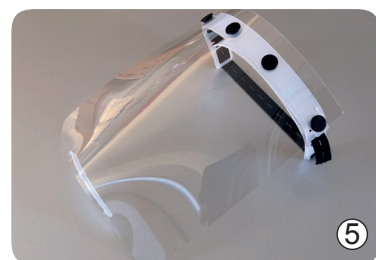

5

## Doporučené metody dezinfekce a sterilizace

METODA	PODMÍNKY	ÚČINNÉ PROTI
Isopropylalkohol	70-75%, 2+ minuty	bakterie, viry
Ethanol	> 70%, 2+ minuty	bakterie, viry
Peroxid vodíku	6-25%, 5+ minut	bakterie, viry
Sanytol	100%, 5+ minut	bakterie, viry
Autokláv (studený)	56-60° C, 60 minut	bakterie, viry

## Nedoporučené metody dezinfekce a sterilizace

Následující metody vypsané níže byly vyhodnoceny jako nevhodné pro proces dezinfekce, protože mohou způsobit poškození polykarbonátu (prasknutí, zmatnění).

METODA	PODMÍNKY	ZÁVĚR
Chlornan sodný (Savo)	0.01-0.5%, 2+ minuty	bakterie, viry
Ostatní agresivní čističe		

## Bezpečnost a sterilizace

V rámci naší výroby jsme přijali následující preventivní opatření: Při výrobě průhledných hledí a komponentů necháváme ochranné fólie na povrchu všech dílů. Doporučujeme sejmutí folií až těsně před sestavením. To výrazně snižuje možnou kontaminaci jednotlivých dílů. Komponenty obličejového štítu jsou baleny do uzavíratelného PE sáčku, a kompletace probíhá v rukavicích a s ochranou maskou. Při stříhání elastického gumičky používáme také ochranné rukavice a masky.

tel. +420 483 360 060  
web titan-multiplast.cz  
eshop multiplast.cz

**TITAN - Multiplast s.r.o.**

Jablonecká 1379  
468 51 Smržovka



EU 2016/425

rev. 4/4/20